



IMS-1455 Shine reNEW Instrument Wipes

20 chusteczek: do czyszczenia, polerowania i ochrony instrumentów. Usuwa plamy, rdzę, osady wodne i naloty. Bezpieczne użycie na stali nierdzewnej, mosiądzu, miedzi i anodyzowanym aluminium.

Instrukcja użycia: Otworzyć pokrywę, ścisnąć kanister i wyciągnąć pokrywę bezpośrednio do góry, aby zdjąć całą pokrywę z kanistra. Ściągnąć plombę i wyrzucić. Umieścić chusteczkę w środku rolki, zwinąć ją i przeciągnąć przez mały otwór w pokrywie. Założyć pokrywę i wyciągnąć przez nią chusteczkę. Pomiedzy kolejnymi zastosowaniami zawsze zatrzaskiwać pokrywę, szczelnie ją zamykając, aby zapobiec utracie wilgoci. Aby usunąć plamy, założyć rękawiczki i pocierać miejsce zaplamienia szmatką, aż plama nie będzie już widoczna. W przypadku silnie zabrudzonych miejsc należy pocierać obszar z większym naciskiem. Po użyciu umyć i wysterylizować instrument zgodnie z normalną procedurą przygotowania instrumentu. Nie używać na złotych pierścieniach lub instrumentach z czarnym uchwytem (węgielk wolframu lub SuperCut).

ZAGROŻENIE



H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu. **P101** W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. **P102** Chronić przed dziećmi. **P280** Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. **P305+P351+P338** W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki

kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. **P310** Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem. Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z miejscowymi/regionalnymi/krajowymi/międzynarodowymi przepisami.

Karta charakterystyki substancji (SDS) dostępna na żądanie lub na stronie: www.hu-friedy.eu **Numer telefonu alarmowego:** MIĘDZYNARODOWY: +49 - (0) 6132 - 84463, GBK GmbH (24h - 7d/w - 365d/a) w Polsce: 112