

# BACTRYL™ DISINFECTANT

Le nettoyage et la désinfection sont fondamentaux pour maintenir un environnement sûr et sain dans un cabinet, et la désinfection des surfaces est souvent effectuée par le personnel courant d'une pièce à l'autre après chaque patient.

Il existe de nombreuses options en termes de désinfectants de surface, et les diverses promesses et niveaux d'efficacité peuvent compliquer la détermination de la meilleure solution. Bactryl™ Désinfectant simplifie le travail pour les cabinets dentaires.



Code article	Description	Unités par boîte
500046	Bactryl™ Spray, Bouteille de 1000 ml	4 bouteilles
500047	Bactryl™ Wipes, Boîte de 110 lingettes	6 boîtes

Le désinfectant Bactryl™ est conçu pour nettoyer et désinfecter les surfaces en agissant très rapidement et efficacement pour tuer un large spectre de microorganismes causant des maladies en une minute.\* Doté d'une formule sans parfum et sans alcool, Bactryl™ Désinfectant peut s'utiliser en toute sécurité sur toutes les surfaces dures et non poreuses, y compris le verre, les matières plastiques, l'acier inoxydable et le vinyle.



## ACTION RAPIDE

- Désinfection en 1 minute sur les bactéries, levures et virus à enveloppe (conformément à la norme EN 14885)
- Désinfection en 30 secondes sur les bactéries et levures par frottement avec une serviette/un chiffon (EN 16615)
- Action fongicide et mycobactéricide en 2 à 10 minutes selon les taches



## SÛR POUR LES SURFACES

Le spray et les lingettes Bactryl sont chimiquement compatibles avec une vaste gamme de matériaux, y compris le polyéthylène (PEHD), le caoutchouc nitrile, le polypropylène (PP), le néoprène, le poly-tétrafluoro-éthylène (PTFE ou Téflon), l'aluminium anodisé, le chlorure de polyvinyle (PVC), les aciers inoxydables 304/316/440, le polytéréphtalate d'éthylène (PET), l'acrylonitrile butadiène styrène (ABS), les caoutchoucs de silicone et le verre.




## NETTOIE ET DÉSINFECTE

Pour nettoyer et désinfecter les surfaces de manière rapide et efficace.



## SANS PARFUM FORT

Aide à éliminer les bactéries causant de mauvaises odeurs sans parfum fort.

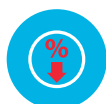

## FORMULE SANS ALCOOL

Ne fait pas adhérer le sang et la saleté aux surfaces.

Testé sur banc et validé en collaboration avec un laboratoire indépendant. Essais effectués en conditions de propreté et de saleté.

Rendez-vous sur notre site internet [HuFriedy.eu](http://HuFriedy.eu)

©2020 Hu-Friedy Mfg. Co., LLC. Tous droits réservés.  
Fabricant : Cantel Medical (Italy) s.r.l.

Hu-Friedy, Omnia, and Crosstex are now proud members of

**HuFriedyGroup**  
The Best In Practice

## DESCRIPTION :

**Le désinfectant Bactryl™ est un désinfectant professionnel**, pour surfaces destinés aux milieux médical et dentaire, conforme aux normes européennes obligatoires en termes d'efficacité microbiologique. Dispositif médical de Classe IIb.

### Détergent et désinfectant (2-en-1) – désinfection en une étape

Activité et propriétés microbiologiques selon la norme UNI EN 14885:2019: « Application des Normes européennes sur les antiseptiques et désinfectants chimiques »

**Entièrement testé et conforme** aux normes européennes les plus strictes. bactéricide, levuricide, mycobactéricide et virucide vis-à-vis des virus à enveloppe.

Efficace également sur les virus tels que MVA, BVDV, VIH, HBV et le virus de la grippe. Il présente donc des performances optimales dans tous les espaces des cabinets dentaires et des hôpitaux.

- Sans ingrédient cancérigènes, mutagènes et toxiques
- Sûr pour les opérateurs
- Excellente compatibilité avec les matériaux : Délicat et sûr pour les surfaces. pH neutre, non corrosif, compatible avec une vaste gamme de matériaux.

Très vaste spectre d'efficacité microbiologique

- Entièrement conforme à la norme **EN 14885** comme désinfectant de surface
- Les lingettes sont conformes à la nouvelle norme **EN 16615** en conditions de propreté et de saleté.
- Bactéricide (**EN 13727**), fongicide (**EN 13624**), bactéricide fongicide (**EN 13697**), virucide (**EN 14476**), myco-bactéricide (**EN 14348**).
- Désinfectant homologué par la **VAH**

## ACTION DÉSINFECTANTE

Action	Norme
Bactéricide*	<b>EN 13727, EN 13697</b> Pseudomonas aeruginosa, staphylococcus aureus, E. coli, enterococcus hirae, salmonella enterica typhimurium, salmonella choleraesuis, proteus mirabilis.
Fongicide/Levuricide*	<b>EN 13624, EN 13697</b> Candida albicans, aspergillus niger, trichophyton mentagrophytes
Bactéricide/Levuricide*	<b>EN 16615</b> Pseudomonas aeruginosa ATCC 15442, staphylococcus aureus ATCC 6538, enterococcus hirae ATCC 10541, candida albicans ATCC 10231
Mycobactéricide/Tuberculicide	<b>EN 14348</b> M. smagmatis, m. avium, m. terrae
Virucide**	<b>EN14476 (HIV, HBV, HCV)</b> DVV/RKI (virus à enveloppe)** BVDV, souche Ankara du virus de la vaccine et virus HIV, HBV, HCV et de la grippe.

\* Testé selon les exigences et méthodes pour la certification des procédures de désinfection chimique par la VAH. Homologué par la VAH. Données d'archives.

\*\* Validé par un laboratoire externe selon les directives du Robert-Koch-Institute RKI (Autorité allemande de la santé) et du Deutsche Vereinigung zur Bekämpfung der Viruskrankungen DVV (Association allemande pour la lutte contre les maladies virales). Données d'archives.

## SURFACES DE CONTACT CLINIQUE EN MILIEU DENTAIRE

L'ECDC et les directives internationales considèrent tout élément entrant en contact avec des instruments, dispositifs, mains ou gants contaminés comme une surface de contact clinique. Ces surfaces peuvent être contaminées par des substances provenant du patient par projection directe ou par éclaboussure lors des procédures dentaires. Les surfaces de contact clinique doivent être nettoyées et désinfectées entre les patients.

### Exemple de surfaces de contact clinique :

- Poignées des lampes
- Interrupteurs
- Ordinateur au fauteuil
- Équipement de radiographie
- Récipients réutilisables de matériel dentaire
- Poignées des tiroirs
- Poignées des robinets
- Plans de travail
- Stylos
- Téléphones
- Poignées de porte



Fabricant : Cantel Medical (Italy) s.r.l.

Service clientèle : Hu-Friedy Mfg. Co., LLC.

Appel gratuit 00800 48 37 43 39 | Télécopie gratuite 00800 48 37 43 40

E-mail : info@hu-friedy.eu | Site internet : HuFriedy.eu

Sauf mention contraire, tous les noms de société et de produits sont des marques commerciales de Hu-Friedy Mfg. Co., LLC ou bien de sociétés affiliées ou connexes. ©2020 Hu-Friedy Mfg. Co., LLC. Tous droits réservés. HFL-494FR/1120

Hu-Friedy, Omnia, and Crosstex are now proud members of

**HuFriedyGroup**  
The Best In Practice